

Wund-Schnellverband & Wund-Pad-Schnellverband

- ▶ Latexfrei
- ▶ Praktische Smartbox

Merkmale

- ▶ Verklebt nicht auf der Wunde
- ▶ Atmungsaktiv
- ▶ Wasser- und ölresistent
- ▶ Dauerelastisch
- ▶ Latexfrei, dadurch antiallergen
- ▶ Rückstandslos ablösbar


Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gelenke bleiben frei bewegbar
- ▶ Pflaster, Gelenkverband, Finger- und Fingerkuppenverband in einem
- ▶ Produkt haftet nur auf sich selbst
- ▶ Kein Zuschneiden notwendig, da von Hand abreißbar

Anwendungsbereiche

- ▶ Alltagsverletzungen
- ▶ Kleinere Schnittwunden
- ▶ Hautabschürfungen
- ▶ Schutz vor äußeren Reizeinflüssen auf die Haut

NEU !!
mit Wund-Pad

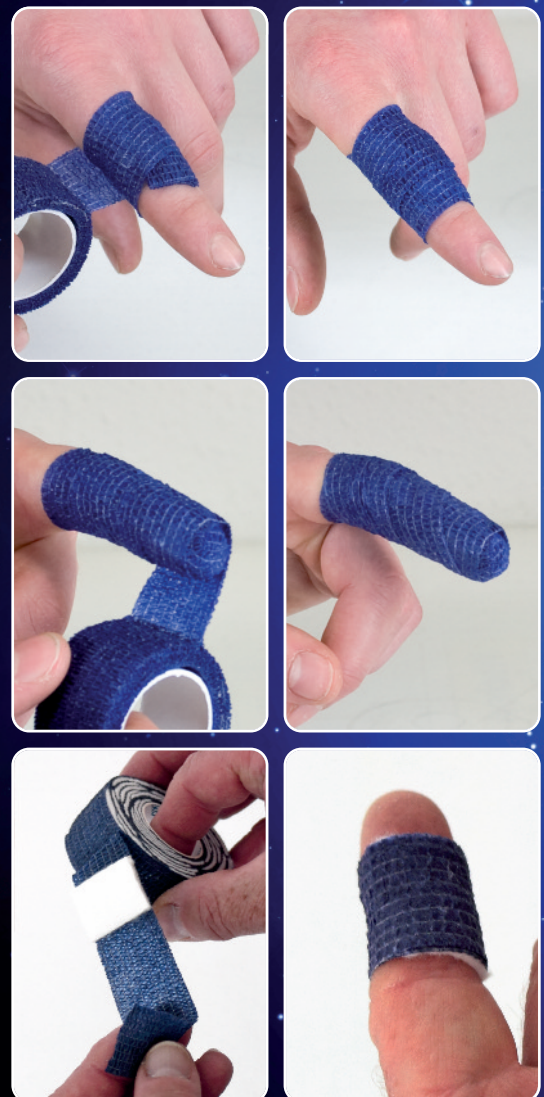

Verpackung mit Eurolochung

Wund-Schnellverband & Wund-Pad-Schnellverband

Einsatzbereich

- ▶ Handwerk
- ▶ Haushalt
- ▶ Kindergarten
- ▶ Sport
- ▶ Freizeit
- ▶ Haustierbesitzer

Verarbeitung

Die Wunde von eventuellen Verschmutzungen säubern. Den **CareLine Wund-Schnellverband** je nach Art der Verletzung (Gelenk- oder Kuppenverletzung) gemäß der beiliegenden Anleitung anlegen. Nach dem Umwickeln ist das Band einfach abzureißen und auf dem Verband fest anzudrücken.

Den **CareLine Wund-Pad-Schnellverband** aus der Verpackung entnehmen und ein Wundkissen je Größe und Blutung der Wunde falten. Das Wundkissen auf die Wunde legen und den Verband mit mittelmäßigem Zug auf beiden Seiten des Wundkissens herumwickeln. Den Verband zum Wundkissen zurückführen. Einfach abreißen und das Ende fest andrücken.

Hinweise

- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Packungsbeilage beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Hand- und Flächendesinfektion 75 ml	290 1 075
Arbeitsschutzhandschuh -cut-	905 020 2xx



Technische Daten

Basis	Textilverbundstoff		
Wasserfest	Es dringt kein Blut durch, und die Wunde wird nicht nass. Sie können sich ganz normal die Hände waschen oder mit nassen Händen arbeiten.		
Elastisch	Stoppt starke Blutungen als Kompressen. Löst sich nicht, wenn das Gelenk bewegt wird, stört nicht beim Arbeiten.		
Klebstofffrei	Klebt nicht an der Wunde oder an Haaren, sondern nur an sich selbst. Keine Kleberreste an den Fingern. Bei Kindern ist der Verband sehr beliebt, da er sich jederzeit absolut schmerzfrei durch Abrollen entfernen lässt.		
Farbe	beige / blau		
Lagerung	nicht über +25° C, trocken		
Inhalt / Verpackung	Wund-Schnellverband 2 Rollen 25 mm à 4,5 m (in Smartbox)	12 Stück/Karton	Art.-Nr. 290 8 002
	Wund-Pad-Schnellverband 2 Rollen 25 mm à 4,5 m (in Smartbox)	12 Stück/Karton	Art.-Nr. 290 8 016

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 04/2019 Art.-Nr. 290 8 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:



@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com